

Finde deine Größe.

Ohne Lineal, ohne deine Millimeter zu kennen. Der Nasenspreizer wird auf zwei Maße gefittet — wie **breit** deine Nase ist und wie weit sie **absteht (Projektion)**. Erst kalibrieren, dann in drei Schritten ablesen.



KURZ ERKLÄRT · DIE ZWEI MASSE

Breite = wie breit deine Nase von außen gemessen ist. · **Projektion (d, lila)** = wie weit die Nasenspitze von einer flachen Fläche an Stirn & Wange nach vorne absteht. Beides zusammen ergibt deinen Fit-Code.

85,60 mm

ISO/IEC 7810
ID-1

53,98 mm

ECHTE KARTE HIER ANLEGEN →


1 ERST KALIBRIEREN

Lege eine EC- oder Kreditkarte in den gestrichelten Rahmen. Deckt sie ihn **exakt** ab, stimmt der Druck. Wenn nicht: neu drucken mit »Originalgröße / 100 %«.

2 BREITE MESSEN

PLATZHALTER-WERTE


Schau frontal in den Spiegel. Lege das Lineal **waagrecht unter die Nase**, auf Höhe der Nasenflügel. Setze **Anschlag 0 (▷)** an die Außenkante des einen Nasenflügels und lies an der Außenkante des anderen ab — die Farbzone dort ist deine Breite.

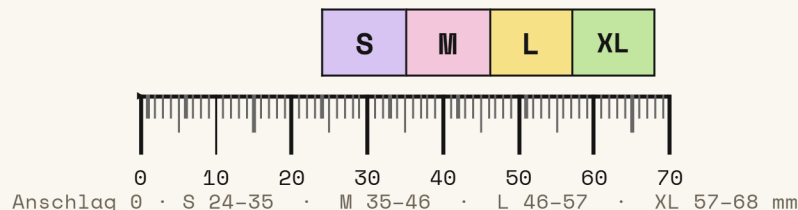

3 PROJEKTION MESSEN

PLATZHALTER-WERTE

Halte ein flaches Buch oder eine Karte **senkrecht an Stirn & Wange** (Profil, wie im Bild). Lege das Lineal im rechten Winkel dazu an und lies ab, wie weit deine **Nasenspitze absteht (d)** — die Farbzone ist deine Projektion.

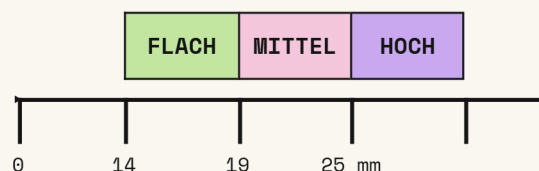

DEIN FIT-CODE

BREITE ↓ / PROJEKTION →	FLACH	MITTEL	HOCH
S	S · F	S · M	S · H
M	M · F	M · M	M · H
L	L · F	L · M	L · H
XL	XL · F	XL · M	XL · H

Kreuze deine **Breite** (Zeile) mit deiner **Projektion** (Spalte). Das Feld ist dein Fit-Code — z. B. **M · M**. Diesen Code bei der Bestellung angeben.

PLATZHALTER

Zonen-Grenzen, Projektionstiefen und Code-Zuordnung sind erfunden. Vor Launch am realen Produkt vermessen.

Ausschneiden & anprobieren.

Der verspielte Weg zur **Breite**: die Umrisse sind echte **Nasen-Silhouetten (Frontalansicht)**. Loch ausschneiden, Nase durchschieben, anprobieren. Für die **Tiefe** geht es weiter auf Blatt C.

1





Erst kalibrieren. Drucke **Blatt A–C zusammen bei »Originalgröße / 100 %«** und prüfe die Kartenkontrolle auf Blatt A. Passt die Karte dort exakt, stimmen auch hier die Lochgrößen.

100 %

- 2 Ausschneiden.** Jedes Loch entlang der gestrichelten Linie ausschneiden.
- 3 Anprobieren.** Nase durch das kleinste Loch schieben, dann größer werden.
- 4 Ablesen.** Das erste Loch, das satt sitzt — ohne Kneifen, ohne Luft — ist deine Größe.

PLATZHALTER-FORM

Die Silhouetten sind eine Näherung, Form & Maße vorläufig. Deine echte Nasen-Vorlage (getracte Referenz) ersetzt sie später 1:1.

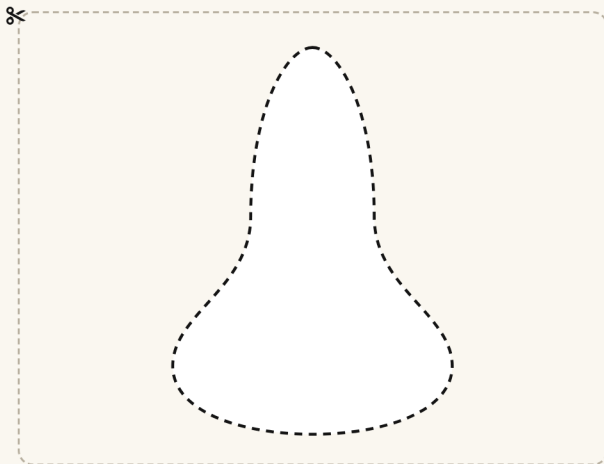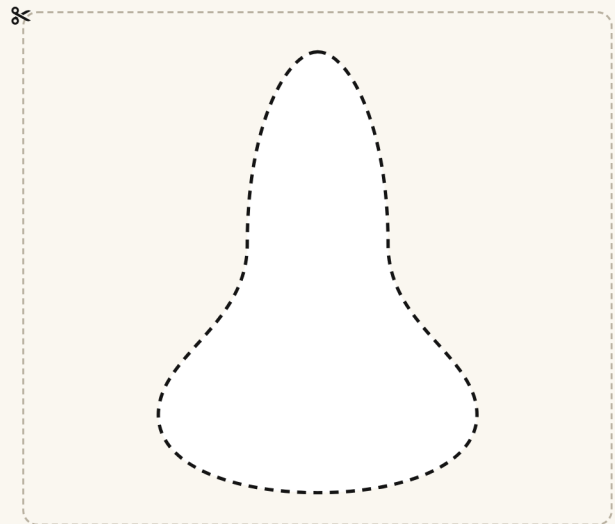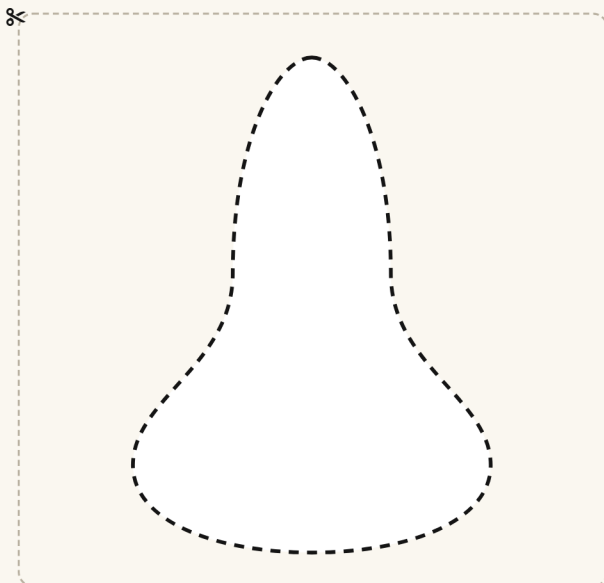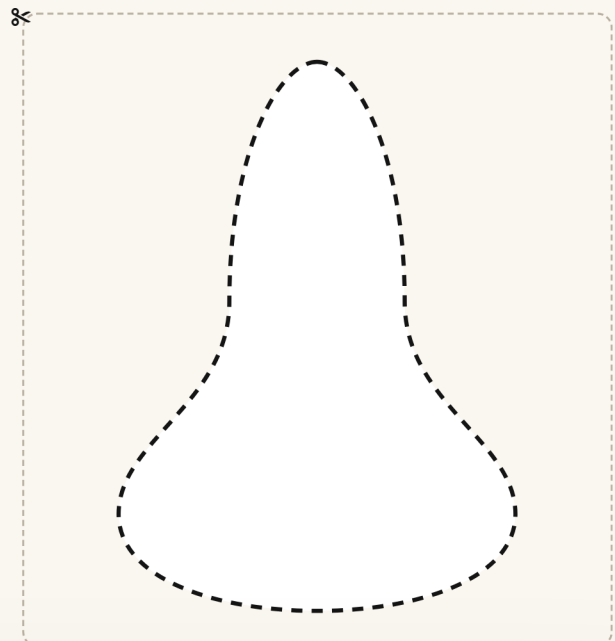**S****M** Standard**L****XL**

Tiefe abgleichen.

Zweiter Ausschnitt — diesmal von der **Seite**. Die Umrisse sind echte **Nasen-Profil (Seitenansicht)** mit wachsender Tiefe. Ausschneiden, seitlich an die Nase halten und das Profil finden, das deine Spitze am besten ausfüllt.

1

Erst kalibrieren. Drucke **Blatt A-C zusammen bei »Originalgröße / 100 %«** und prüfe die Kartenkontrolle auf Blatt A. Passt die Karte dort exakt, stimmen auch hier die Profil-Tiefen.

100 %

2

Ausschneiden. Jedes Profil entlang der gestrichelten Linie ausschneiden.

3

Anhalten. Flache Kante an Stirn & Wange, das Profil seitlich neben deine Nase (Spiegel).


4

Ablesen. Das Profil, das deine Spitze eben ausfüllt — ohne Lücke, ohne Überstand — ist deine Tiefe.


PLATZHALTER-FORM

Die Profil-Formen sind eine Näherung, Tiefen vorläufig. Deine echte Nasen-Profil-Vorlage (getracte Referenz) ersetzt sie später 1:1.


— flache Kante = an Stirn & Wange · Spitze zeigt nach vorne →

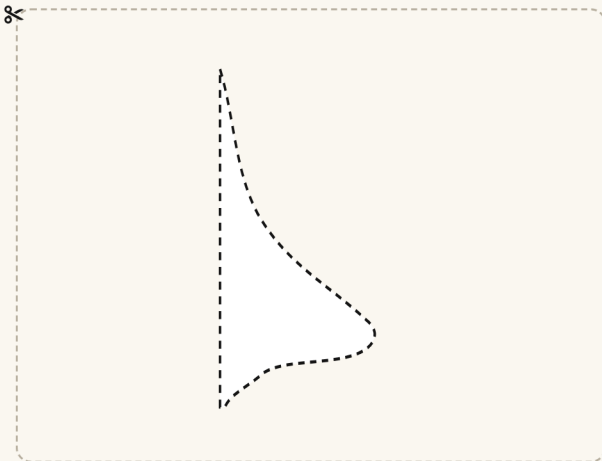


S

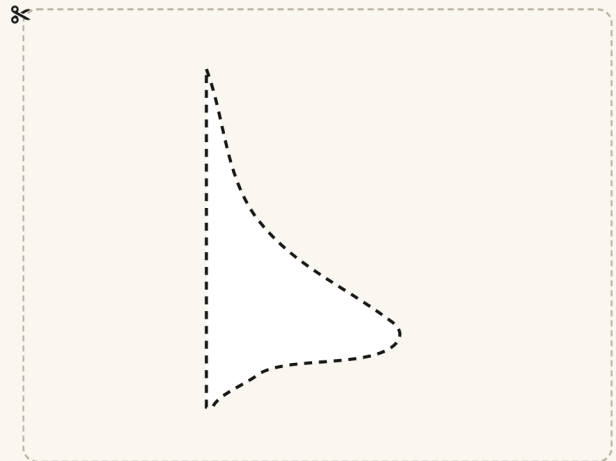

M Standard

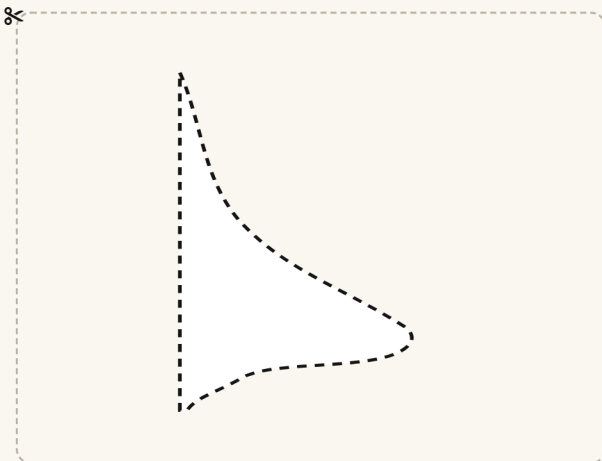

L

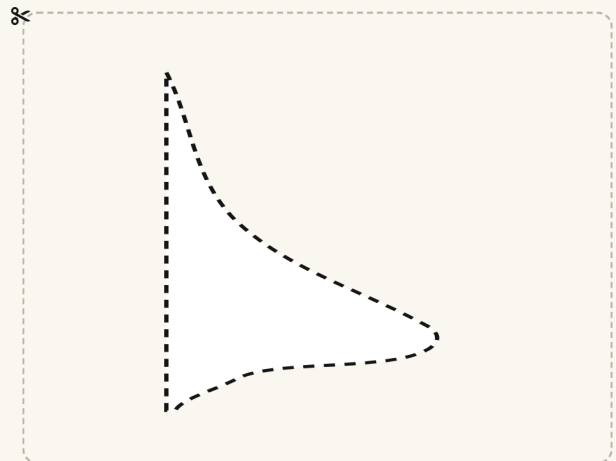

XL